

医療用品 04 整形用品  
 一般医療機器 アイパッド  
 JMDNコード:11661000

## 貼る眼帯 EM


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

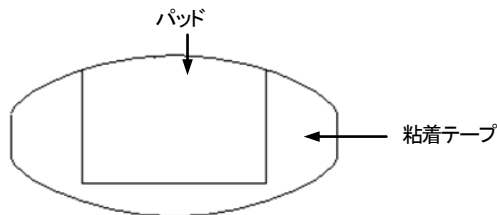

断面図

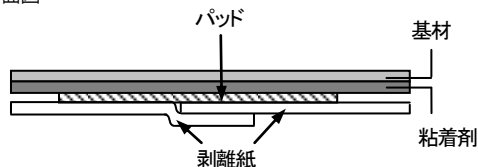

- ・粘着テープ : ポリエステル不織布  
 アクリル系粘着剤
- ・パッド : ポリエチレンネット状フィルム両面付脱脂綿

＜原理＞

パッドとそれを固定する用途の粘着テープからなる。眼の保護又は、分泌物の吸収に用いる。

#### 【使用目的又は効果】

眼の保護又は分泌物の吸収に用いる。

#### 【使用方法等】

- ・眼の周りを清潔にしてください。
  - ①はくり紙をひらいてください。(粘着面及びパッド部に手が触れないようご注意ください。)
  - ②粘着剤がついていない方を上(眉毛側)にしてください。
  - ③パッド部が眼を覆うように当て、はくり紙をはがしながら貼ってください。
- ※皮膚に水分・クリーム・汚れ等が残っていると密着性が損なわれますので、きれいにふき取ってからご使用ください。

#### 【使用上の注意】

- ・本品の使用により「発疹」「発赤」「かゆみ」等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- ・粘着面を傷や湿疹、かぶれ等の患部に貼らないでください。
- ・個包装が開封・破損している場合は使用しないでください。
- ・本品の使用前にパッドに異常がないことをご確認ください。
- ・本品の使用中にパッド部分が汚れたり水に濡れた時は、新しいものに貼りかえてください。
- ・本品の使用中は歩行や階段の昇り降りにご注意ください。また、本品の使用中に自転車等の運転はお避けください。
- ・本品の使用中に粘着剤のにおいを感じる場合がありますが、製品の異常ではありません。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激にはがしたりしないでください。

- ・使用後は感染防止に留意し廃棄してください。
- ・斜視・弱視訓練用ではありません。
- ・ご使用は機能、衛生上1枚1回限りとしてください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。
- ・本品は滅菌済ですので、個包装を破らないように保管し、開封後はすみやかにご使用ください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞  
 水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。

＜有効期間＞  
 パッケージに表示[自己認証による。]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞  
 氏名:新タック化成株式会社  
 住所:香川県三豊市豊中町上高野 4148 番地  
 電話番号:0875-62-6555(代表)