

# 機械器具 81 磁気治療器

## 管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000)


### ピップマグネネック

#### 【禁忌・禁止】

心臓ペースメーカー等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。

#### 【形状・構造及び原理等】

1. 構成  
本体  
添付文書

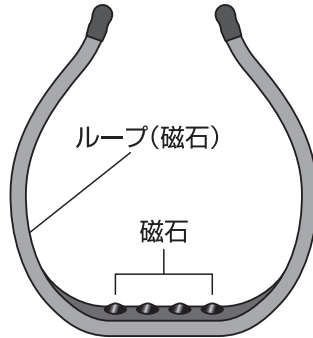

2. 原理  
永久磁石の磁力を利用して、人体に磁力線を浸透させて治療します。

3. 最大磁束密度  
・磁石部 180mT(ミリテスラ)  
・ループ部 45mT(ミリテスラ)

#### 【使用目的、効能又は効果】

一般家庭での磁気治療に使用する。  
装着部位のこり及び血行の改善

#### 【使用方法等】

ご使用にあたっては、説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法  
首に装着します。

#### 【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。
  - (1) 悪性腫瘍のある方
  - (2) 心臓に障害のある方
  - (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
  - (4) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
  - (5) 皮膚に感染症または創傷のある方
  - (6) 安静を必要とする方
  - (7) 体温38℃以上(有熱期)の方  
例1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期  
例2. 衰弱しているとき
  - (8) ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性(とつ)痛性疾患の方

2. 他の治療器と同時に使用しないでください。
3. 使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。
4. 使用する前には次のことにご注意ください。
  - (1) 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
  - (2) しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
5. 使用中には次のことにご注意ください。
  - (1) 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
  - (2) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
  - (3) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査の前に、取りはずしてください。
6. 使用後及び保管には次のことにご注意ください。
  - (1) 機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。
7. 機器の取り扱いには次のことにご注意ください。
  - (1) 機器は改造しないでください。
8. ネックレス以外の用途では使用しないでください。
- 9 頭部に使用しないでください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

#### 【保守・点検に係る事項】

使用に際し、異物の付着等がないか確認の上ご使用ください。常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、弊社お客様相談室までご連絡ください。

#### 【包装】

1個入り

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:ピップ株式会社

住 所: 奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場)

お問い合わせ先: お客様相談室(取扱説明書参照)

製造業者:ピップ株式会社

住 所: 大阪市中央区農人橋2丁目1番36号

裏面の説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

# ピップマグネネック取扱説明書

## 注意事項

- ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。※裏面の文書も必ずお読みください。
- お読みになったあとは保存し、わからないときに再読してください。

## ご使用前に

ご使用のたびに、ピップマグネネックに金属片(針やピンなど)が付着していないか確認する。(鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをするおそれがあります。)

## お願い


1. 次のような使用はしないでください。(劣化や変色の原因になります。)
  - ① クリーム、スプレー、シップなどの薬剤と併用
  - ② 入浴剤を入れた風呂への入浴
  - ③ 温泉浴
  - ④ 海水浴
2. 一度に強く曲げないでください。(折れる原因になります。)
3. 車など高温になる場所や、真冬の屋外など極端に低温になる場所での保管はしないでください。(変形の原因になります。)
4. 使用目的以外の用途に使用しないでください。
5. こりの症状が改善したら、とりはずしてください。
6. 就寝中は使用しないでください。

## ご使用方法

1. 下図に従って、直接肌に触れるように首に装着します。




首まわりの適応サイズは  
28cm～41cmまでです。

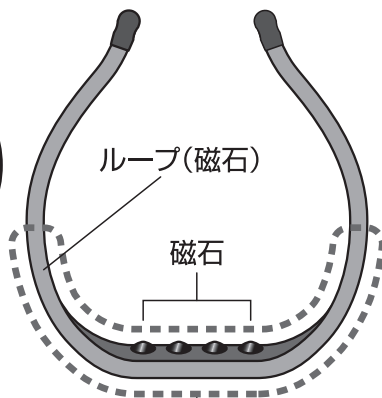

点線部分は折り曲げないでください。  
破損の原因になります。

2. きつい・ゆるいなど感じたら図の部分  
を少しずつ曲げて調節してください。

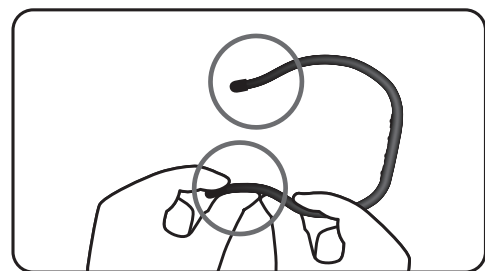

※就寝中は使用しないでください。

## お手入れ方法

まめに水、またはぬるま湯で洗い流してください。  
石けんや洗剤での洗浄は劣化の原因となります。また、お手入れをしないままでの  
ご使用は、汗や皮脂による黄変や臭気の原因となります。

## ⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。  
※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

1. 首筋に湿疹や傷がある場合は使用しない。(症状が悪化するおそれがあります。)
2. 使用中皮膚や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。
3. 製品に伸びや膨らみなどの異変を感じたら、使用を中止する。
4. サウナなど、高温になる場所で使用しない。
5. 火気のそばに置かない。(変形の原因になります。また引火すると有毒ガスが発生するおそれがあります。)

※ご使用に際し、ご不明な点がございましたら、当社お客様相談室にご相談ください。

お問い合わせ

**ピップ株式会社**  
大阪市中央区農人橋2-1-36  
〒540-0011

## お客様相談室

☎(06)6945-4427

土・日・祝日を除く10:00～17:00