

【ピップ ジースピナー保証書】

| | | |
|---------|------------------|-----------------------------------------------|
| お客様ご記入欄 | フリガナ | |
| | お名前 | 様 |
| | ご住所 | 〒 |
| | 電話番号 | () - |
| ※販売店 | 店名 住所 電話番号 | |
| | ご購入日 | 年 月 日 保証期間:ご購入より1年間(装着用テープを除く) |

ご購入店様へ お客様へ商品をお渡しする際に必ず※印の欄に所定事項をご記入ください。




PIP Σ:SPINNER

回転磁気治療器 ピップ ジースピナー

取扱説明書

PZS1ST33・PZS1E55
PZS1EG77・PZS1EC99
PZS2ST44・PZS2E66
PZS2EG88・PZS2EC00

医療機器認証番号
302AKBZX00046000
機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器
家庭用永久磁石磁気治療器
(71016000)

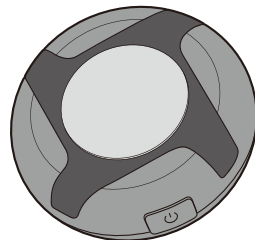

ご使用前に必ずお読みください。

- 誤った取り扱いによって生じる危害や損害を未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも手に取れる場所に保管し、わからないことや不具合が生じたときに再読してください。
- 保証書は「ご購入日・販売店名」など必要事項の記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保管用

保証書付き

2021年10月1日(第2版)

目次

| | |
|------------------|-----|
| ピップ ジースピナーとは | 4 |
| 安全上のご注意 | 5 |
| 充電に関するご注意 | 11 |
| 各部の名前 | 14 |
| ご使用の前に | 15 |
| ご使用方法 | 16 |
| 使用に関するご注意 | 19 |
| ご使用が終わったら | 20 |
| 保管・お手入れ | 21 |
| 廃棄 | 22 |
| よくあるご質問 | 24 |
| こんなときは | 26 |
| 定格・仕様 | 28 |
| 保証書とアフターサービスについて | 30 |
| 保証書 | 裏表紙 |

ピップ ジースピナーとは

永久磁石を回転させ装着部位のコリ及び血行を改善する回転磁気治療器です。

ピップ独自の専用モーターが磁石を高速回転させそれによって生み出された強力な変動磁場が広く血行を改善します。






- ・本製品は、永久磁石からなる円柱磁石と、円柱磁石を電氣的に回転させるための機能を各部に有したもので、永久磁石による磁気を患部に作用させて治療を行う充電式の回転式家庭用永久磁石磁気治療器です。
- ・円柱磁石の静止時及び回転時の最大磁束密度は同じです。

安全上のご注意 必ずお守りください



ここに示した注意事項は、誤った取り扱いによって生じる危害や損害を未然に防ぐための重大な内容を記載しています。

※表示と意味は次の通りです。

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  危険 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。 |
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

※図記号の意味は次の通りです。

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | してはいけない禁止の内容です。 |
|  | 実行しなければならない内容です。 |

安全上のご注意 必ずお守りください

心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。

警告



小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んで喉に詰まらせるなど、思わぬ事故に繋がるおそれがあります。



小さなお子様に使用させたり、遊ばせたりしないでください。



警告



●顔、頭など首から上には貼らないでください。



●治療以外の目的には使用しないでください。

●他の治療器と同時に使用しないでください。
事故・トラブル・故障の原因になります。

●同じところに連続して貼らないでください。
万が一かぶれた場合は、すぐに使用を中止し、
医師にご相談ください。

●肌に異常がある場合は使用しないでください。
症状が悪化するおそれがあります。

●本体を火中に投入しないでください。
電池が破裂してケガややけどを起こすおそれがあります。

●時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。

 **警告**



使用中には次のことにご注意ください。

- 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
- 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査の前に取りはずしてください。
- しばらく使用しなかったときは、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
- 使用しても効果が現れない場合は、医師などの専門家に相談してください。

 **警告**



● 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。

- ・ 悪性腫瘍のある方
- ・ 心臓に障害のある方
- ・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- ・ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ・ 皮膚に感染症または創傷のある方
- ・ 安静を必要とする方
- ・ 体温38℃以上(有熱期)の方
 - 例1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期
 - 例2. 衰弱しているとき
- ・ 捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方

安全上のご注意 必ずお守りください

お願い (故障を防ぐために)

- お客様ご自身で分解・修理・改造をしないでください。
- 本体に水やお湯をかけたり、つけたりしないでください。
- 無理な力を加えたり、落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えないでください。
- サウナなどの湿気の多いところでは使用しないでください。
- 電源を入れた状態の製品を金属など磁石がつくものに貼りつけないでください。
- 2個お持ちの場合は電源を入れた状態の製品の底面同士を密着させないでください。

充電に関するご注意 必ずお守りください

注意



- 付属のUSBケーブル以外は接続しないでください。また、他の製品に使用しないでください。
やけど、加熱、ショートなどによる事故、火災、トラブル、故障につながるおそれがあります。
- 付属のUSBケーブルは本体の充電以外には使用しないでください。
- USBコネクタ差込口に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
感電・障害・故障の原因になります。
- USBコネクタ差込口に金属類を差し込まないでください。
発熱や発火の原因になります。
- USBケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上に乗せたりしないでください。
ケーブルが傷ついたり断線したりして、火災や感電の原因になります。

充電に関するご注意 必ずお守りください

注意




● USBケーブルが傷んだり、USBコネクタ
差込口がゆるい時は使用しないでください。
発火や感電の原因になります。

● トラベル用コンバーターなどの変圧器を
使って充電しないでください。
発熱や発火の原因になります。

● シガーソケットなどを使って、
車内で充電しないでください。
発火や発熱、感電の原因になります。

● 濡れた手で付属のUSBケーブルを
触らないでください。
発火や発熱、感電の原因になります。



●  本製品は安全特別低電圧5VDC(1A)の
ものだけに接続してください。
PSEマークの施されているACアダプター
のみに接続してください。

注意



● 充電時、付属のUSBケーブルは根元まで
確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な状態で充電すると、
発火や感電の原因になります。

● 長期間使用しなかった時は、
充電の有無を確認の上ご使用ください。

● 完全放電をさせないように、
3ヶ月に1度充電してください。



● 充電中は電源が入らないため
使用しないでください。

各部の名前

【本体】

スイッチ

長押しで作動。


15分後に自動的に電源が切れます。



| スイッチの状態 | 赤色点灯 | 緑色点灯 | 青色点滅 (0.1秒おき) | 青色点灯 | 青色点滅 (1秒おき) |
|---------|------|------|------------------|------|----------------|
| 説明 | 充電中 | 充電完了 | 準備中 | 稼働中 | 電池残量低下 |

USB差込口

カバーを開けて付属のUSBケーブルの
コネクタを差し込んでください。

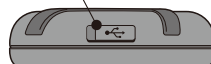


【取扱説明書】(本書)

【付属品】


USBケーブル USB Type-A コネクター
充電専用

microUSB Type-B コネクター

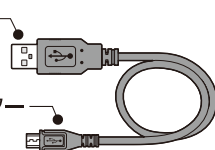

装着用テープ

取り扱い方法P.16参照

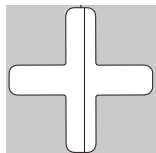

10枚

専用ケース

持ち運びに便利です。



ご使用の前に

使いはじめ(購入直後や長期間使用しなかったとき)や使用中に電池残量がなくなったときは、必ず満充電になるまで充電してください。




警告

使用に際し、異物の付着などが無い確認の上ご使用ください。
常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合は
すぐに使用を中止し、ピップお客様相談室までご連絡ください。

USBケーブルを接続して、充電されているか確認します。

- スイッチが**赤色**に点灯…充電中
 - スイッチが**緑色**に点灯…充電完了
- ※約1.5時間で充電が完了し、
約5回ご使用いただけます。

金属部分の保護フィルムを
はがしてからご使用ください。

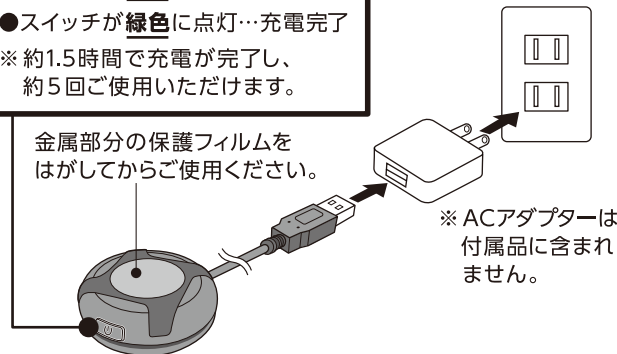

※ACアダプターは
付属品に含まれ
ません。




注意


- ◆本製品は安全特別低電圧5VDC(1A)のもの
だけに接続してください。PSEマークの施されている
ACアダプターのみに接続してください。

ご使用方法


① 装着用テープを用意します。

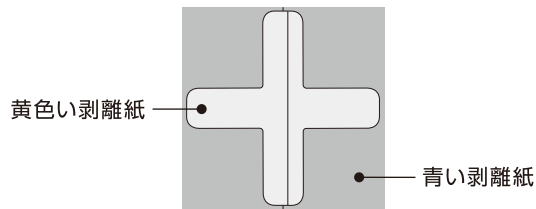


② 青い剥離紙を1枚ずつはがします。

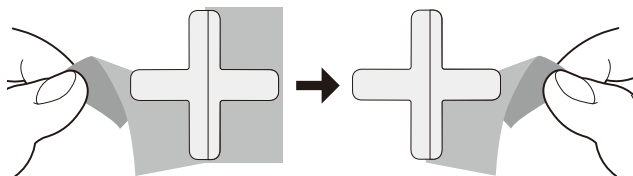

③ 装着用テープを
本体裏側に貼ります。

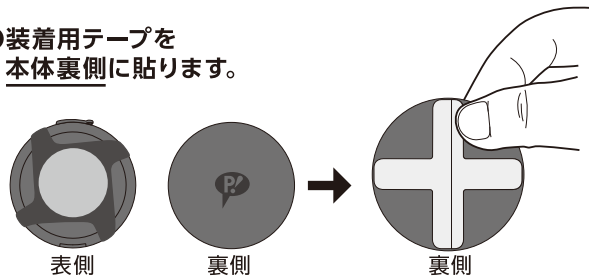


④ 黄色い剥離紙を1枚ずつはがします。

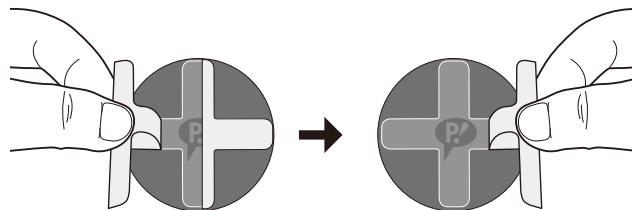

⑤ 装着用テープを貼った本体のスイッチ  を


しっかり長押しし、電源を入れます。

※スイッチをカチッと音が鳴るまで押してください。

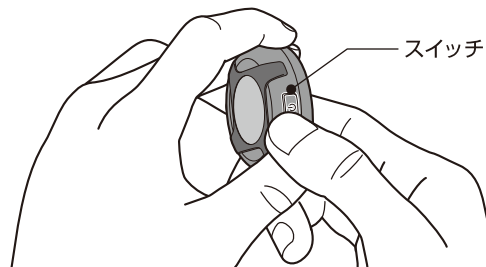

ご使用方法

- ⑥スイッチが青色に点灯したらコリのポイントに貼ります。
上から押さえて密着させます。
※ 貼りなおすと粘着力が低下します。

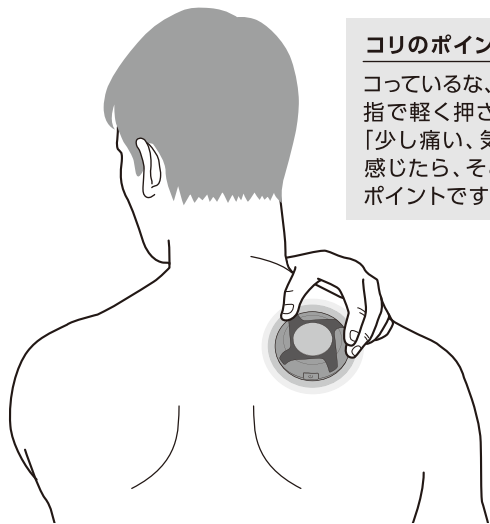

コリのポイントの見つけ方

コっているな、と思うところを指で軽く押さえてください。「少し痛い、気持ちいい」と感じたら、そこがコリのポイントです。

- ⑦15分後に自動的に電源が切れます。

(スイッチが消灯します。)

※途中で使用を中止する場合は、
スイッチを3秒間長押しして電源を切ってください。

※スイッチが青色に点滅(1秒おき)した場合は充電してください。

使用に関するご注意

お願い

- 一度貼った装着用テープは使用しないでください。
粘着力が低下しはがれやすくなります。
- 皮膚の汚れや汗はよく拭き取ってください。
水分や油脂がついているとはがれやすくなります。
- クリーム、スプレー、香水をつけた上から使用しないでください。
- スポーツ後や入浴後は、汗が引いてから貼ってください。
汗が残っていると、はがれやすくなります。
- 貴金属などをつけて使用しないでください。
磁石が影響を受けて回転しない場合があります。
- 貼りつけたまま入浴しないでください。
故障の原因になります。
- 就寝時、スポーツ時は使用しないでください。
貼る位置によっては圧力がかかり故障の原因になります。

ご使用が終わったら

①肌から装着用テープごとはがします。

本体に指を添えゆっくりはがします。



注意



- 勢いよくはがさないでください。
皮膚を傷める原因になります。

②本体から装着用テープをゆっくりはがします。



注意



- 同じ位置に貼る場合は1日以上あけてください。1日に2回以上使用される場合は、貼る位置をずらしてご使用ください。

保管・お手入れ

保管

- 高温・多湿・直射日光はさけてください。
変形や故障の原因になります。
- 時計、磁気カード、パソコンなど、磁気の影響を受けるものの近くに保管しないでください。
- 使用しないときは、専用ケースに入れてください。
本体を冷蔵庫や鉄板などにつけて保管しないでください。
- 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

お手入れ

ぬるま湯か中性洗剤を含ませた布で拭いてください。

- シンナーやベンジンなどは使用しないでください。
変色・変形の原因になります。

●廃棄するときは

お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

●リチウムイオン電池の取りはずし方

廃棄する前に電池を機器から取りはずす必要があります。





警告

下記手順は、製品を廃棄するためのものであり修理用のものではありません。分解した場合は修理不可能です。製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。


- ・充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。
- ・電池を取りはずすときは、機器を電源から遮断してください。

- ① 本体からネジ隠しカバーを取りはずしてください。
- ② 本体を固定しているネジ(4箇所)を取りはずしてください。

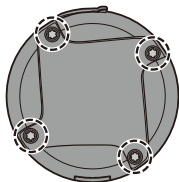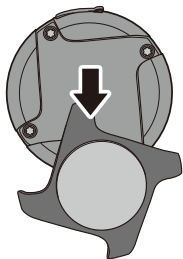

- ③ ニッパーで電池の黒いコード(-)、赤いコード(+)の順に切ってください。

※取りはずした電池はショートさせないよう端子部にテープを貼り絶縁してください。

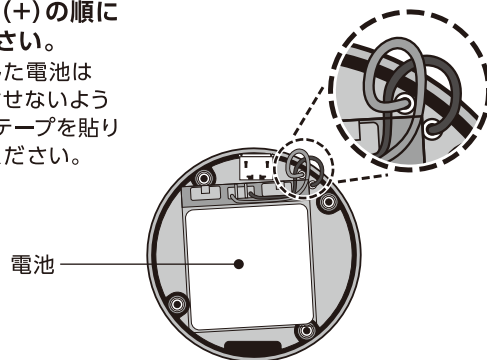

●リチウムイオン電池 リサイクルのお願い



Li-ion

- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルのご協力をお願いいたします。
- ・廃棄する時は電池を分解しないでください。
- ・一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池がショートし、発火、発熱の原因になります。

よくあるご質問

Q1 電源を入れてもスイッチが点滅してすぐに動かないことがあるのですがなぜですか？

A1 電源を入れた際に、安全のため製品内部で異常確認を行っているためです。点滅終了後、通常通り稼働します。

Q2 使用中も長い点滅が続くのですがなぜですか？

A2 充電残量が少ないためです。
充電してください。

Q3 個体によって動作音が違うのですが治療効果に違いはありますか？

A3 製造上の個体差により数dB程度の音量差はありますが治療効果に違いはありません。同じ機種でもモーターなどの個体差により振動や動作音が異なる場合があります。

Q4 使用中に動作音にバラつきがあるのはなぜですか？

A4 使用中の姿勢や、本体の装着位置・角度によって同じ製品でも音量が変化する場合があります。

Q5 1回の充電でどの程度使用できますか？

A5 約5回使用できます。(使用環境により変化します。)

Q6 充電は何回できますか？

A6 約500回の充電で蓄電池の容量が60%まで低下します。正しく充電しても充電1回あたりの稼働回数が少なくなった場合、蓄電池の寿命と考えられますので新しい製品をお買い求めください。(電池寿命は使用、保管などの状態により変化する場合があります。)

Q7 電池が消耗して動かなくても効果はあるのですか？

A7 磁気の効果はありますが、磁気を広範囲に効率よく浸透させる機能はなくなります。

Q8 いつ使えば良いですか？

A8 コリが気になるときにご使用ください。
ただし、就寝時やスポーツ時など、本体に圧力がかかる時は故障の原因になるので使用しないでください。

Q9 海外で使用しても良いですか？

A9 使用しないでください。
海外の電圧電源では、充電できません。

Q10 装着用テープがなくなったら、どこで購入できますか？

A10 販売店もしくは通販サイトでお買い求めください。

装着用テープ (30枚入り)
品番: PZS30B オープン価格

こんなときは

下記内容をご確認いただいても直らない場合、直ちに使用を中止し、ピップお客様相談室(P.30記載)までご連絡ください。

こんな症状：スイッチを押しても動かない

| 原因 | 処置 |
|---------------------|---------------------------------|
| 充電が切れている。 | ▶ 充電する。 |
| 本体を充電している。 | ▶ 本体の充電が終了してから、USBケーブルを抜いて使用する。 |
| 鉄など磁石がつくものの上に置いている。 | ▶ 磁石がつくものから4cm以上離す。 |
| スイッチが正しく押せていない。 | ▶ カチッと音が鳴るまで強く押しこみ長押しする。 |

こんな症状：充電できない

| 原因 | 処置 |
|----------------|----------------------------------|
| USBケーブルが抜けている。 | ▶ USBケーブルを正しく接続する。 |
| 充電せずに長期間放置した。 | ▶ 使用できません。完全放電させないように3ヶ月に1度充電する。 |

こんな症状：本体から装着用テープがすぐにはがれる

| 原因 | 処置 |
|------------------|----------------------------------------|
| 本体がぬれている。 | ▶ 本体を中性洗剤を含んだ布でよく拭き、乾かした後、装着用テープを交換する。 |
| 本体に油脂が付着している。 | ▶ 使用済みの装着用テープを使った。 |
| 使用済みの装着用テープを使った。 | ▶ 新しい装着用テープに交換する。 |

こんな症状：身体からすぐにはがれる

| 原因 | 処置 |
|------------------|-------------------------------|
| 装着部位がぬれている。 | ▶ 装着部位をよく拭いた後、新しい装着用テープに交換する。 |
| 装着部位に油脂が付着している。 | ▶ 使用済みの装着用テープを使った。 |
| 使用済みの装着用テープを使った。 | ▶ 新しい装着用テープに交換する。 |

定格・仕様

| | | |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 販売名 | ピップジースピナー | |
| モデル名 | PET02 | |
| 対象品番 | PZS1ST33 PZS1E55 PZS1EG77 PZS1EC99 | PZS2ST44 PZS2E66 PZS2EG88 PZS2EC00 |
| 包装 | 1個入 | 2個入 |
| 類別 | 機械器具 81 磁気治療器 | |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000) | |
| 医療機器認証番号 | 302AKBZX00046000 | |
| 最大磁束密度 | 160mT | |
| 使用目的又は効果 | 一般家庭での磁気治療に使用する。 装着部位のこり及び血行の改善 | |
| 本体 | サイズ | 約φ50mm×14mm |
| | 重量 | 約26g |
| | 定格電圧 | DC5V |
| | 消費電力 | 2.5W |
| | 使用周囲温度 | 25±5℃ |
| | 使用時間 | 目安1回あたり15分 |
| | 感電に対する保護のクラス分類 | クラスIII機器 |
| | 水の侵入に対する保護 | IPX4 |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 装着用テープ | 材質 | PET | |
| | 粘着剤 | アクリル系粘着剤 | |
| USBケーブル | 長さ | 約30cm | |
| 専用ケース | 材質 | ABS樹脂 | |
| 充電用ACアダプター(別売品) | 型番 | RH-050100JP-1 | |
| | 定格入力 | AC100V~240V、50/60Hz、0.4A | |
| | 定格出力 | DC5V、1A | |
| | 感電に対する保護のクラス分類 | クラスII機器 | |
| 製造国 | 日本 | | |
| 製造販売元 | ピップ株式会社 奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場) | | |
| 製造業者 | ピップ株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番36号 | | |

保証書とアフターサービスについて

●修理について

こんなときは(P.26)の内容をご確認いただき、直らない場合は販売店もしくはピップお客様相談室へご連絡ください。

保証期間中は保証規定に従って対応させていただきます。修理には必ず保証書が必要になりますので、紛失しないよう大切に保管してください。

(再発行は行いません。)

●個人情報のお取り扱いについて

お客様にご提供いただいた個人情報は、ご相談対応などに利用させていただきます。なお、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

お問い合わせ



ピップ株式会社

大阪市中央区農人橋2-1-36 〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427

土・日・祝日を除く10:00~17:00

<ピップ ジースピナー> ホームページ pip-zspinner.com

【保証規定】

1. 本製品の保証期間は、ご購入後1年間といたします。
(保証書必要)
2. 保証期間内に取扱説明書の注意書に従った正常な使用状況で消耗品以外が故障した場合、お客様相談室へご連絡ください。
保証規定に基づき対応いたします。
3. 保証期間中でも次の場合は保証対象外になります。
 - ①取扱説明書の注意書に反する異常な使用状況での故障及び損傷。
 - ②使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ③ご購入後の輸送・落下・衝撃・浸水などによる故障及び損傷。
 - ④火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変による故障及び損傷。
 - ⑤通常一般家庭内で想定される使用環境以外(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥保証書に販売店ならびにご購入年月日の記載がない場合
またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書)をご提示いただけない場合。
 - ⑦保証書の字句が修正されている場合。
 - ⑧その他、無償交換が認められない事由が発見された場合。
4. 保証書は日本国内での使用のみ有効です。
5. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※保証書は本書の明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。従って、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
ご不明な点はピップお客様相談室へお問い合わせください。
6. 保証書のご提示がない場合や無償期間を過ぎた場合は有償修理いたします。